

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA

- Svaki uzorak koji dolazi u laboratorij mora imati pravilnu ispisanu uputnicu
- Ne prihvaćaju se nepravilno označeni uzorci (uzorci bez imena i prezimena)
- Pacijent mora biti pravilno pripremljen
- Krv se mora uzorkovati u odgovarajuće epruvete (ovisno o pretragama), pri čemu treba paziti na količinu uzete krvi (puniti do oznake na epruveti)
- Ne prihvaćaju se zgrušani uzorci za hematološke i koagulacijske pretrage
- Ne prihvaćaju se hemolitični uzorci za određivanje K, Ca, Mg, Cl, AST, ALT, CK, GGT, LDH, kolesterola, triglicerida, bilirubina, ukupnih proteina, el. foreze proteina u serumu
- Ne prihvaćaju se uzorci za koje se utvrdi da su uzeti iz infuzijskog sustava
- Epruvete s uzorcima moraju biti dostavljene u uspravnom položaju
- Uzorci za amonijak i laktat moraju se donijeti na ledu odmah po vađenju
- **Lipemični uzorci ne prihvaćaju se za određivanje amilaza, ukupnog kalcija, bakra, željeza, laktata, LDH, ukupnih proteina, hemoglobina, te kalija i natrija**